

Instrucciones de uso

Lea detenidamente la información, ya que le ayudará a utilizar el colirio correctamente.



OmniTears®

COLIRIO
HIDRATANTE Y PROTECTOR

Soft

(Hialuronato sódico 0,10%)

Colirio humectante para hidratar y proteger la superficie del ojo con ácido hialurónico.

Para un alivio duradero de la sequedad ocular y las molestias en los ojos relacionadas con las condiciones ambientales, p. ej., escozor, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño en el ojo.

Solución estéril sin fosfatos y sin conservantes.

Beneficioso, bien tolerado y duradero. Apto para lentillas duras y blandas.

¿Qué es OmniTears® Soft?

OmniTears® Soft es un agente humectante estéril, sin fosfatos y de viscosidad media que se suministra en el innovador sistema OmniTears® Soft, un envase multidosis sin conservantes desarrollado con la colaboración de OmniVision. Permite una aplicación óptima gracias a la gran superficie de apoyo para los dedos.

OmniTears® Soft contiene ácido hialurónico y permite una hidratación mejorada y duradera de la superficie del ojo. El ácido hialurónico es una sustancia natural muy bien tolerada, ya que también está presente en las estructuras del ojo humano y en la película lagrimal. Destaca por su gran capacidad de retención de agua, se adhiere bien a la superficie ocular (propiedades mucoadhesivas) y es viscoelástico. De este modo, OmniTears® Soft hidrata y protege la superficie del ojo y proporciona una película hidratante uniforme, estable y especialmente duradera en la superficie ocular. OmniTears® Soft ayuda a aliviar el escozor de ojos, los ojos llorosos y la sensación de cuerpo extraño en el ojo. Alivia de forma duradera la sequedad y las molestias en los ojos relacionadas con las condiciones ambientales.

OmniTears® Soft es apto para humedecer las lentillas, mejorando considerablemente la comodidad para los usuarios.

Composición

Hialuronato sódico (0,10%), sorbitol, cloruro de sodio, citrato de sodio, ácido cítrico, agua purificada.

OmniTears® Soft se puede utilizar en los siguientes casos:

- Para los ojos secos debido a, p. ej., el síndrome de Sjögren o la administración de medicamentos
- Para el estrés ambiental, p. ej., por aire acondicionado, viento, frío, sequedad o contaminación del aire por humo de tabaco, entre otros
- Para el cansancio y el estrés visual provocados por una demanda excesiva de la vista, p. ej., al usar pantallas de ordenador y microscopios o al conducir durante largos periodos
- Para el esfuerzo mecánico, p. ej., por llevar lentillas duras o blandas.

¿En qué casos no se debe utilizar OmniTears® Soft?

- En caso de tener una hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

¿Para quiénes es adecuado OmniTears® Soft?

- Es apto para el uso en jóvenes y adultos.
- Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y los niños pequeños deben consultar a su médico antes de utilizar OmniTears® Soft.

¿Qué efectos secundarios puede tener OmniTears® Soft?

- Después del uso, puede verse reducida temporalmente la agudeza visual (visión borrosa). En tal caso, no se deben conducir vehículos ni operar máquinas. Se recomienda esperar hasta que se haya recuperado la agudeza visual normal.
- Justo después de aplicar el colirio pueden aparecer síntomas pasajeros, como un ligero escozor de ojos.

¿Qué medidas de precaución y advertencias se deben tener en cuenta?

- No lo utilice si el envase multidosis OmniTears® Soft está dañado.
- No deje que la punta del cuentagotas entre en contacto con el ojo, para prevenir infecciones o lesiones en el ojo.
- La punta del cuentagotas no debe entrar en contacto con otros objetos o partes del cuerpo.
- No lo utilice como tratamiento exclusivo de una infección ocular.
- No utilice el colirio una vez superada la fecha de caducidad, que viene indicada en el bote OmniTears® Soft y en la caja plegable.
- Un solo envase multidosis no debe ser utilizado por varios pacientes.
- No utilice OmniTears® Soft como líquido de conservación de lentillas.
- Guarde OmniTears® Soft fuera del alcance de los niños.
- Si durante la aplicación de OmniTears® Soft persisten las molestias, acuda al oftalmólogo.


¿Cómo se usa OmniTears® Soft?

Solo para uso externo.




Paso 1:

Antes del primer uso, anote la fecha de apertura del producto en el campo previsto para ello en la etiqueta del bote. Antes de cada uso, retire la tapa protectora.

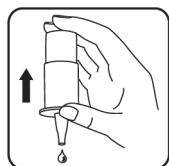

Paso 2:

Antes de usar el bote OmniTears® Soft por primera vez, pulse varias veces hasta que salga la primera gota. Al hacerlo, mantenga el bote boca abajo, como se muestra en la imagen. Evite que la punta del cuentagotas entre en contacto con los dedos o con los ojos.

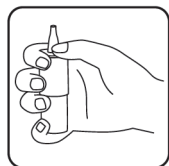

Paso 3:

Sostenga el bote como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el pulgar quede apoyado sobre la gran superficie de apoyo para los dedos redondeada y antideslizante.



Paso 4:

A continuación, incline la cabeza un poco hacia atrás y, con la mano que le queda libre, tire un poco del párpado inferior hacia abajo. Deje caer una o dos gotas de OmniTears® Soft en el saco conjuntival de cada ojo pulsando una o dos veces el mecanismo de bombeo. Al hacerlo, asegúrese de mantener el bote en posición vertical. Cierre los ojos lentamente para que OmniTears® Soft se distribuya uniformemente por toda la superficie ocular.

Como alternativa, si utiliza el colirio en combinación con lentillas, en lugar de poner las gotas directamente en los ojos, aplique una o dos gotas sobre cada lentilla antes de ponérselas. También se puede aplicar OmniTears® Soft con las lentillas puestas.

Después de utilizar el envase multidosis, vuelva a colocar la tapa protectora.

Después de utilizar el envase multidosis, vuelva a colocar la tapa protectora.

Después de utilizar el envase multidosis, vuelva a colocar la tapa protectora.

¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se debe usar OmniTears® Soft?

Utilice OmniTears® Soft según sea necesario o según las indicaciones del médico.

OmniTears® Soft es adecuado para un uso prolongado. No obstante, al igual que con cualquier enfermedad, consulte a su oftalmólogo si las molestias persisten durante un periodo de tiempo prolongado.

Si está tomando algún otro tratamiento local para los ojos, deje que pasen aprox. 30 minutos entre una aplicación y otra. OmniTears® Soft se debe aplicar **después** del otro producto.

Tamaños de envase disponibles:

Colirio en envases multidosis OmniTears® Soft de 10 ml.

¿Qué indicaciones se deben tener en cuenta a la hora de almacenar y desechar el producto?

Almacene el producto a entre 5 °C y 25 °C. Protéjalo del frío y de la luz solar directa.

El número de lote y la fecha de caducidad vienen indicados en el bote y en la caja plegable.

Tras abrir el bote, puede utilizarse OmniTears® Soft durante seis meses.

OmniTears® Soft puede tirarse a la basura doméstica.

Estado del prospecto: Febrero de 2023

OmniVision GmbH
Lindberghstrasse 9
82178 Puchheim, Alemania

Tel.: +49 89 840792-30

Fax: +49 89 840792-40

www.omnivision.de

Correo electrónico: info@omnivision.de



Distribución España:

OmniVision Farma España S.L.
Calle Josep Irla i Bosch 1-3
08034 Barcelona, España

	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Estéril utilizando técnica aséptica
	Consultar las instrucciones de uso
	Producto sanitario
	No utilizar si el embalaje está dañado

	Límite de temperatura
	Proteger de la luz solar y del calor
	Código de lote
	Fecha de caducidad
	Identificador único de producto
	Sistema de barrera estéril único con un embalaje de protección exterior



OmniVision GmbH, Lindberghstrasse 9, 82178 Puchheim, Deutschland
E-Mail: info@omnivision.de

NOT200412V01 06/2023

1. Korrekturlauf

27. 09. 2023

Produkt:

GI OmniTears SD Soft 0.1% 10ml

ID: NOT200412V01

Format in mm: 160x300x0

Auftrag: **A693200.00**

Artikel: **536377**

Zusatz-Infos:

-

Farbigkeit VS/RS: 1/1

052/9 C

Druckfarben:

● Black

● Black

zusätzliche technische Merkmale: